



Flairesse Paste



DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 · 22547 Hamburg · Germany · www.dmg-dental.com
092727CN/2021-04



Gebrauchsinformation

Deutsch

Produktbeschreibung

Zahnreinigungs- und Polierpaste zur professionellen Zahnreinigung und Politur der Zahnoberflächen im Rahmen einer Prophylaxebehandlung. Flairesse Paste wird in der Single Dose und in der Tube in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen angeboten. Durch die drei unterschiedlichen Abrasionsgrade der Pasten kann individuell, je nach Grad der Verunreinigung, auf die jeweilige Patientensituation reagiert werden.

Zweckbestimmung

- Entfernung oberflächlicher weicher und harter Zahnbeläge.
- Entfernung extrinsischer Verfärbungen (z. B. Kaffee-, Tee- oder Tabakverfärbungen).

Verwendungsbeschränkung

Das Material darf nicht angewandt werden, wenn die Kontrolle über den Schluckreflex bei dem Patienten nicht gewährleistet ist.

Indikation

- Extrinsische Verfärbungen
- Zahnbeläge

Kontraindikation

Das Material nicht bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe oder bei Kontaktallergien verwenden.

Patientenzielgruppe

Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesehener Anwender

Zahnarzt, zahnärztliches Fachpersonal

Hinweise zur Anwendung

- Wird das Material mithilfe einer Einmalapplikation direkt im Mund des Patienten ausgebracht, so ist diese aus hygienischen Gründen nur bei einem Patienten zu verwenden.
- Alle im Handel erhältlichen Einmal-Prophylaxe-Winkelstücke oder Polierkelche können verwendet werden.
- DMG empfiehlt, die Prophylaxepasten nacheinander (mit absteigendem Abrasionsgrad) zu verwenden. Für okklusale Flächen Bürsten verwenden.
- Die Single Dose und die Tube sind mit einem Originalitätsverschluss versehen.
- Vor der ersten Anwendung auf Unversehrtheit des Originalitätsverschlusses achten.

Empfohlene Anwendung

Vorsicht! Überhitzungsgefahr bei unsachgemäßer Anwendung.

- ▶ Darauf achten, dass ausreichend Material in dem genutzten Polierkelch vorhanden ist.

Vorsicht! Verschluckungsgefahr bei unzureichender Speichelabsaugung.

- ▶ Speichel während der Behandlung gründlich absaugen.

Paste aus Single Dose anwenden

Hinweis: Jede Single Dose enthält ausreichend Material für eine Prophylaxebehandlung. Jede Single Dose darf nur bei einem einzelnen Patienten angewandt werden.

1. Originalitätsverschluss der Single Dose mit Hilfe der Lasche abziehen und werfen.
2. Die Single Dose in den zugehörigen Prophylaxehalter einsetzen.
3. Zum Befüllen den Polierkelch bei niedriger Geschwindigkeit in die Prophylaxepaste halten und Material aufnehmen.
4. Mit dem Polierkelch die Prophylaxepaste 20 s pro Zahn bei 3000 bis 5000 U/min einarbeiten.
5. Überschüssige Prophylaxepaste absaugen und vom Patienten ausspucken lassen.

Paste aus Tube anwenden

Hinweis: Um einer Austrocknung des Materials vorzubeugen, die Tube verschließen, sobald das Material ausgebracht wurde.

1. Beim erstmaligen Gebrauch einer Tube den Originalitätsverschluss mit Hilfe der Lasche abziehen und werfen.
2. Eine ausreichende Menge Material auf einen Mischblock ausbringen.
3. Zum Befüllen den Polierkelch bei niedriger Geschwindigkeit in die Prophylaxepaste halten und Material aufnehmen.

4. Mit dem Polierkelch die Prophylaxepaste 20 s pro Zahn bei 3000 bis 5000 U/ min einarbeiten.
5. Überschüssige Prophylaxepaste absaugen und vom Patienten ausspucken lassen.

Wechselwirkungen

Keine Wechselwirkungen bekannt.

Restrisiken / Nebenwirkungen

Übermäßiges Verschlucken des Materials kann zu Übelkeit und Brechreiz führen. Das Restrisiko einer Hypersensibilität gegen Komponenten des Materials ist nicht auszuschließen.

Warnungen / Vorsichtshinweise

- Nur für den zahnärztlichen Gebrauch.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Kontakt mit der Haut vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Hautkontakts die betroffene Stelle sofort gründlich mit Wasser und Seife waschen.
- Kontakt mit den Augen vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Augenkontakts sofort gründlich mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.
- Herstellerangaben von anderen Produkten, die mit dem Material/den Materialien verwendet werden, beachten.
- Schwerwiegende Vorkommnisse mit diesem Produkt sind dem Hersteller sowie den zuständigen Meldebehörden anzuzeigen.
- Nicht verschlucken.

Leistungsmerkmale des Produkts

Fluoridgehalt: ca. 12300 ppm

Lagerung / Entsorgung

- Bei 15 bis 25 °C (59 bis 77 °F) trocken lagern!
- Nicht im Kühlschrank lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.
- Unter Beachtung der nationalen Vorschriften entsorgen.


Zusammensetzung


Bimsstein (ca. 47 %), Glycerin (ca. 35 %), Wasser (ca. 9%), Natriumfluorid (< 3 %), Phosphorsäure (< 2 %), Additive (ca. 5 %)

Frei von Aspartam, Gluten und Saccharin.

Enthält Xylitol.

Packaging

200 Single Doses @ 1.8 g, 1 Propy Ring	
Mint fine	REF 220414
Mint medium	REF 220415
Mint coarse	REF 220416

1 Tube @ 75 ml	
Mint fine	REF 220417
Mint medium	REF 220418
Mint coarse	REF 220419
Melon fine	REF 220423
Melon medium	REF 220424
Melon coarse	REF 220425

MD Medical Device

de	Medizinprodukt
----	----------------

清洁抛光膏

使用说明书

产品名称

清洁抛光膏

产品描述

作为预防性治疗的一个环节,清洁抛光膏被用于专业洁牙及牙齿表面的抛光。Flairesse 清洁抛光膏,分杯装和管剂两种包装,每种包装都有两种不同口味。这款抛光膏有三种不同的磨砂等级,您可以根据患者的具体情况,按照所需的清洁程度进行选择使用。

型号、规格

杯装

香味	粒度	型号	规格
薄荷	细粒度	220414	每杯1.8克,每盒200杯
	中粒度	220415	
	粗粒度	220416	
甜瓜	细粒度	220420	
	中粒度	220421	
	粗粒度	220422	

管剂

香味	粒度	型号	规格
薄荷	细粒度	220417	每管75 毫升,每盒1管
	中粒度	220418	
	粗粒度	220419	
甜瓜	细粒度	220423	
	中粒度	220424	
	粗粒度	220425	

结构及组成

成分:浮石、硅酸钠、甘油、水、氯化钠、木糖醇、三氯蔗糖、山梨酸钾、正磷酸、琼脂、色素、香料和香气。

适用范围

清除牙齿表面软和硬的菌斑以及外源性染色(例如:咖啡渍、茶渍和烟渍)。

禁忌症

下列情况中不得使用本产品:

- 对于本产品任何所含成分过敏或者存在接触性过敏,
- 患者无法控制吞咽反射。

基本安全须知

- 仅用于牙科!
- 请放在儿童无法触及之处!
- 切勿吞咽!
- 避免触及皮肤!若不慎触及皮肤,请用肥皂和清水彻底清洗接触区域。
- 避免触及眼睛!若不慎入眼,请立即用大量清水彻底冲洗眼部,必要时咨询医生。

副作用

过量吞咽本产品可能会引起恶心。

包装形式

- 杯装
- 管剂

使用说明

- 可使用任何市售牙齿预防治疗用慢速弯机头和抛光杯。
- DMG建议按顺序使用清洁抛光膏(逐渐减少磨砂等级)。使用牙刷清洁咬合面。
- 杯装和管剂均配有密封盖。初次使用前,请确认密封盖是否完好。

推荐使用

注意!使用不当会造成过热。
确保在抛光杯中有足够量的材料。
注意!吸唾不充分时,有吞咽风险。
治疗期间要彻底吸走唾液。

使用杯装抛光膏。

请注意:单杯即可保证一次预防性治疗的使用量。每杯仅限一位患者使用。

1. 拉动标签揭去杯装的密封盖并丢弃。
2. 将杯装抛光膏插入适用的固定器。
3. 将抛光杯安装在慢速机头上,然后将其插入到清洁抛光膏中来蘸取适量的材料。
4. 用蘸有清洁抛光膏的抛光杯以3000-5000rpm的速度进行操作,并对每颗牙齿抛光20秒。
5. 吸去多余的清洁抛光膏并让患者将其吐出。

使用管剂抛光膏。

请注意:为防止膏剂干结,请在用完本产品后扣好盖子。

1. 初次使用时,打开盖子,拉动标签揭去密封盖并丢弃。
2. 将足量的膏剂挤到混合容器内。
3. 将抛光杯安装在慢速机头上,然后将其插入到清洁抛光膏中来蘸取适量的材料。
4. 用蘸有清洁抛光膏的抛光杯以3000-5000rpm的速度进行操作,并对每颗牙齿抛光20秒。
5. 吸去多余的清洁抛光膏并让患者将其吐出。

储存与有效期

- 储存于室温 (15-25 °C/59-77 °F) 下!
- 切勿储存于冰箱内!
- 避免直接暴露于日光下!
- 该产品保质期为36个月。超过有效期后请勿使用!
- 生产日期和失效日期见包装上的标签

原产地:德国

注册人/生产企业

名称:DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
(德国DMG化学医药集团公司)

住所/生产地址:Elbgastrasse 248, 22547 Hamburg, Germany
(埃尔布高大街248号, 22547汉堡, 德国)

电话:+49.(0)40.84006-0

传真:+49.(0)40.84006-222

www.dmg-dental.com

代理人/售后服务单位

名称:DMG医疗器械(北京)有限公司

住所:北京市海淀区马甸东路17号5层618

邮编:100088

电话:010-8200 0086

传真:010-8200 0087

info@dmg-dental.com.cn

产品技术要求编号/注册证编号:国械注进20152170848

修订日期:2019-02