



Infiltratie met Icon smooth surface: micro-invasieve methode met een breed scala van toepassingen.



Meer informatie over diagnose en behandelingsstappen is te vinden op de volgende pagina en op www.dmg-dental.com/icon-vestibular



TANDHEELKUNDIGEGESCHIEDENIS EN DIAGNOSE

White Spots

Fluorose

Trauma

MIH*

Diagnose diepte van de vlek

Oppervlakkige laesie

Gemengde laesie

Diepe laesie

Bleken (indien nodig)

2 weken wachten

14

Rubber Dam/ Liquid Dam

Microabrasie (optioneel)

Zandstralen/microabrasie

Diamantboor

Icon-Etch

2 min

Herhalen

De whitespots zijn afgenomen

Icon-Dry

30 s

De whitespots zijn nog steeds zichtbaar

Icon-Infiltrant

≥3 min

Lichtuitharding

40 s

Lichtuitharding

40 s

Icon-Infiltrant

1 min

Composiet toevoegen (optioneel)

Polijsen

VOORBEHANDELING

INFILTRATIE

* MIH is niet geïndiceerd in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.