



LuxaForm



DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 · 22547 Hamburg · Germany · www.dmg-dental.com
092944CN/2022-03



Gebrauchsanweisung

Deutsch

Produktbeschreibung

LuxaForm ist ein thermoplastisches Abformpolymer.

Zweckbestimmung

Abformungen für die Provisorienherstellung.

Verwendungsbeschränkung

LuxaForm nicht für die Abformung von mehr als 5 Zähnen verwenden.

Indikation

Alle dentalen Fälle, die indirekte Restaurationen erfordern, z. B. Zahnverlust, Karies und Trauma.

Kontraindikation

Das Material nicht bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe oder bei Kontaktallergien verwenden.

Patientenzielgruppe

Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesehener Anwender

Zahnarzt, zahnärztliches Assistenzpersonal

Hinweise zur Anwendung

- Weiches LuxaForm haftet an Handschuhen. LuxaForm stets ohne Handschuhe kneten. Für das Einsetzen in den Mund die Fingerspitzen der Handschuhe leicht mit Vaseline isolieren.
- Um eine sichere Entnahme zu gewährleisten, LuxaForm bei der Abdrucknahme im Mund nicht zu eng an den Zahn modellieren.
- Vorhandene Unterschnitte mit einem geeigneten Mittel, z. B. Wachs, ausblocken.
- LuxaForm nicht für die Abformung von mehr als 5 Zähnen verwenden.
- Eine eventuell notwendige Nachbearbeitung der Abformung nur mit einem Skalpell durchführen.
- Die Abformungen sind über Monate formstabil und können auch später, z. B. bei Bruch eines Provisoriums, erneut verwendet werden.

Empfohlene Anwendung

1. Eine LuxaForm Tablette pro abzuformenden Zahn in ca. 70 °C heißes Wasser geben, bis das Material weich und klar geworden ist (ca. 1 Minute). Bei mehrgliedrigen Arbeiten entsprechend mehrere Tabletten nehmen. Die Tabletten können im transparenten Zustand zusammengeknetet werden.
2. Transparentes Material evtl. zu einem Quader vorformen und um die abzuformenden Zähne modellieren.

Hinweis: Nach dem Abkühlen wird das Material schnell hart und blauopak. Durch kurzes Besprühen mit Wasser kann das Abkühlen beschleunigt werden.

3. Erhärtetes LuxaForm vom Zahn nehmen und leicht mit Vaseline oder einem anderen Trennmittel isolieren.

Hinweis: Bei Verwendung eines provisorischen Kronen- und Brückenmaterials darf dieses eine Ausgangstemperatur von 25 °C nicht überschreiten.

4. Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial (z. B. Luxatemp Star) wie gewohnt applizieren.

Wechselwirkungen

Nicht mit MMA-haltigen provisorischen Kronen- und Brückenmaterialien verwenden.

Restrisiken/Nebenwirkungen

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. Das Restrisiko einer Hypersensibilität gegen Komponenten des Materials ist nicht auszuschließen.

Warnungen/Vorsichtshinweise

- Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Kontakt mit den Augen vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Augenkontakts sofort gründlich mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.
- Herstellerangaben von anderen Produkten, die mit dem Material/den Materialien verwendet werden, beachten.

- Schwerwiegende Vorkommnisse mit diesem Produkt sind dem Hersteller sowie den zuständigen Meldebehörden anzuzeigen.

Leistungsmerkmale des Produkts

Formstabil bis ca. 55 °C.

Lagerung / Entsorgung

- Bei 15 bis 25°C (59 bis 77°F) trocken lagern!
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
- Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden!
- Unter Beachtung der nationalen Vorschriften entsorgen.

Zusammensetzung

Polycaprolacton (ca. 98 %), Additive, Pigmente

Handelsformen

72 Tabletten	
	REF 110415

使用说明

中文版

LuxaForm 是一款易于使用的热塑性印模聚合物。对于口径较小、咽反射严重的患者,或者正在准备后臼齿时,LuxaForm 是最为理想的选择。

适应症

- 为临时性修复体制作印模

推荐使用

1. 每个牙齿使用一个 LuxaForm 盘,将其置于 70 °C 左右的热水中直至材料变软变透明(约过 1 分钟)。当为多个牙齿印模时,应使用多个 LuxaForm 盘。盘呈透明状时可轻易地揉捏成团。
2. 必要时将透明材料初步加工至立方体,并在牙齿周围塑形。材料冷却后迅速变成坚硬且不透明的蓝色。可以用水喷洒以进一步加速冷却。
3. 从牙齿中取出硬化的 LuxaForm,用凡士林或其他分离剂轻轻将其隔离。按照惯例使用临时性牙冠和牙桥材料(如, Luxatemp Star)。

使用提示

- 软化的 LuxaForm 会与手套粘连,因此揉捏时不应佩戴手套。当将其置于口中时,用凡士林轻轻将手套指尖隔离。
- 为确保移除时的安全,印模时不应将模具 LuxaForm 过紧地压在牙齿上。
- 用合适的材料(如蜡)将凹陷部分填补平整。
- 切勿使用含 MMA 的牙冠和牙桥材料。
- 切勿将 LuxaForm 用于 5 个以上牙齿的印模。
- 应用手术刀对印模材料进行进一步的制模处理。

成分

聚己酸内酯, 添加剂, 染料

存放和保质期

- 储存在室温 (15-25 °C/59-77 °F) 的干燥处。
- 该产品保质期为36个月。过期请勿使用。
- 生产日期和失效日期见包装上的标签。

LuxaForm 印模材料能在数月内仍保持稳定,若后期临时性修复体损坏,亦可重复使用。

包装形式

72 片装	REF 110415
-------	------------

远离儿童! 仅供专业牙医使用!

注册人/生产企业

名称: DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
(德国DMG化学医药集团公司)
住所/生产地址: Elbgastrasse 248, 22547 Hamburg, Germany
(埃尔布高大街248号, 22547汉堡, 德国)
电话: +49.(0)40.84006-0
传真: +49.(0)40.84006-222
www.dmg-dental.com

代理人/售后服务单位

名称: DMG医疗器械(北京)有限公司
住所: 北京市海淀区马甸东路17号5层618
邮编: 100088
电话: 010-8200 0086
传真: 010-8200 0087
info@dmg-dental.com.cn