



Für wahre Abform- Meisterwerke

Honigum Pro Light · Honigum Pro Mono
Honigum Pro Heavy · Honigum Pro Putty
Präzisionsabformmaterial



Außergewöhnlich
standfest und fließfähig



Geschmacksneutral
mit Honigduft

 **DMG**



Macht beim Abformen,
was Sie wollen:
Honigum Pro


Standfest, wo es sein muss – fließfähig, wenn es fließen soll

Honigum Pro erleichtert Ihnen alle Abformaufgaben im Dentalbereich und wurde speziell für die Implantatprothetik entwickelt.

Profitieren Sie von den Besonderheiten von Honigum Pro bei Ihrer täglichen Arbeit. Denn die DMG patentierte Materialstruktur sorgt schnell, sicher und sauber für präzise Ergebnisse und erzielt damit Topwerte in Alltagstests und Studien – bei Patienten und Zahnärzten gleichermaßen.

Dank seiner ausgezeichneten Standfestigkeit, wenn kein Druck ausgeübt wird, kann Honigum Pro sicher eingebracht werden und verbleibt an der applizierten Stelle. Unter Druck, zum Beispiel beim Einbringen des Löffels, erreicht das Material kleinste Räume auch im feuchten Milieu zuverlässig und sorgt damit für exakte Abformungen. Entscheiden Sie, wann Honigum Pro standfest bleibt und wann es fließt.

Das einzigartige Präzisions-A-Silikon bietet Ihnen überzeugende Vorteile:

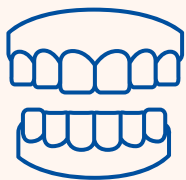


Ausgezeichnete
Detailwiedergabe

Für zuverlässig
präzise Abformungen

Komfortable
Verarbeitungszeit

Bei kurzer Mund-
verweildauer

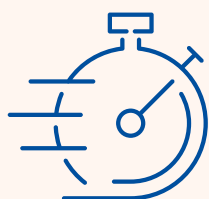

Außergewöhnlich
standfest und fließfähig

Je nach Situation

Sichere Entnahme

Durch außergewöhnliche
Reißzähigkeit



Geschmacksneutral
mit Honigduft


Honigum Pro – handfeste Vorteile für die tägliche Arbeit

Abformmaterialien müssen vor allem beim Einsatz unter Feuchtigkeit überzeugen. Die spezielle Kristallstruktur von Honigum Pro, die rheologisch aktive Matrix, bietet dabei den entscheidenden Mehrwert für Sie und Ihre Patienten.

Im Test und Vergleich mit Mitbewerberprodukten zeigt Honigum Pro im Bereich der subgingivalen Präparationsgrenze **das beste Anfließverhalten unter feuchten Bedingungen** im künstlichen Sulkus. Das optimale Zusammenspiel aus guter Hydrophilie und einzigartigem rheologischen Verhalten garantiert Ihnen absolute Genauigkeit bei der Abformung.


Doch Honigum Pro bietet Ihnen in der täglichen Arbeit einen weiteren, wesentlichen Vorteil. Die **exzellente Kombination aus Reißfestigkeit und Dehnfestigkeit** – wissenschaftlich als Reißzähigkeit oder Toughness bezeichnet – ist für die sichere Entnahme aus dem Mund entscheidend. Auch bei diesem Faktor setzt sich Honigum Pro von anderen Produkten ab, stellt damit die höchste Qualität der Restauration sicher und spart dadurch gleichermaßen Zeit und Geld. Denn eine Abformung, die bei der Entnahme aus dem Mund reißt, ist eine verlorene Abformung.

Eindringtiefe in den feuchten Sulkus

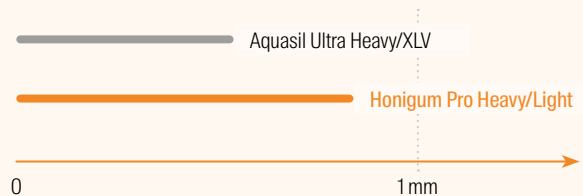

Honigum Pro zeigt hier die beste Eindringtiefe in den Sulkus für eine **detailgetreue Abformung**.²

Reißzähigkeit

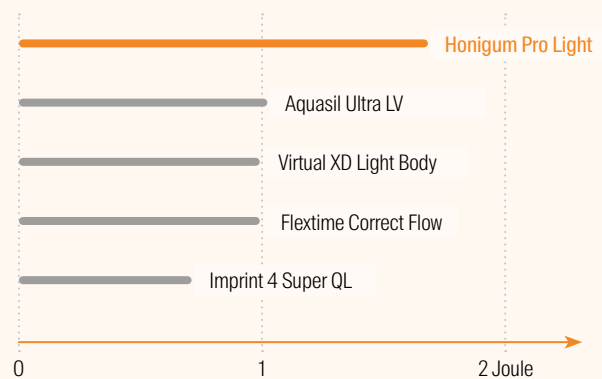

Honigum Pro Light zeigt herausragende Ergebnisse in der Reißzähigkeit – gut für eine sichere Entnahme.¹

¹ DMG interne Messung, Data on file, 2011.


² Prof. Dr. B. Wöstmann, Justus-Liebig-Universität Gießen, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik.

»Snap-Set«-Technologie für maximalen Komfort

Großzügige Verarbeitungszeit bei verkürzter Mundverweildauer – die »Snap-Set«-Technologie von DMG berücksichtigt die Bedürfnisse von Zahnarzt und Patient gleichermaßen.

- Honigum Pro verkürzt die **Mundverweildauer** und sorgt damit für deutlich mehr **Komfort** während der Behandlung.
- Dadurch reduziert sich der Stress für Patient und behandelnden Zahnarzt auf ein Minimum.
- Der Zahnarzt kann **entspannt und sicher arbeiten** – auch intraoral – denn die Viskosität bleibt über einen großzügigen Zeitraum konstant.
- Verzerrungen durch bereits abgebandenes Material werden vermieden.
- **Schnellere Vernetzungszeiten** verringern Ungenauigkeiten durch Mikrobewegungen.

Snap-Set-Technologie

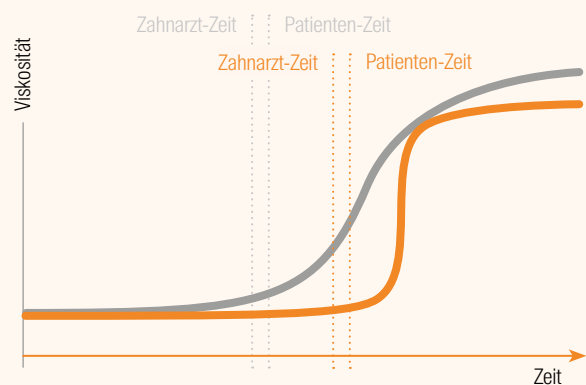

Komfortable Verarbeitungszeit bei kurzer Mundverweildauer.
Maximaler Komfort für Zahnarzt und Patient mit Honigum Pro.¹


Doppelmischabformung



1.1 Applizieren des Light-Materials



2.1 Einsetzen des befüllten Abformlöffels mit Honigum Pro Putty und Honigum Pro Light

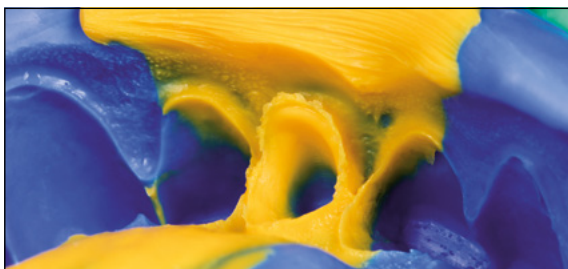

1.2 Der homogene Abdruck als Ergebnis



2.2 Detailgetreue Abformung mit Honigum Pro Putty und Honigum Pro Light

¹ DMG interne Messung, Data on file, 2011.


Ihr unkomplizierter Abformhelfer: DMG Retraction Paste

Ohne präzise Abformung keine passgenaue Restauration. Die DMG Retraction Paste unterstützt sie dabei besonders: Noch nie war die temporäre Sulkuserweiterung leichter und effektiver – inklusive adstringierender Wirkung auf die Gingiva.


Die Compule aus speziellem Kunststoff lässt sich ganz nach Wunsch biegen. So können Sie Ihre bevorzugte Biegung vornehmen und im Patientenmund überall gut arbeiten.

Die homogene Konsistenz der DMG Retraction Paste ist optimal eingestellt. Das Material verbleibt dank seiner guten Standfestigkeit an der applizierten Stelle und entfaltet dort optimal seine Wirkung.


- Individuell biegsame Compule für einfachste Applikation
- Optimale Konsistenz – optimale Ergebnisse
- Gute Sichtbarkeit im Sulkus
- Schnell, einfach, effizient

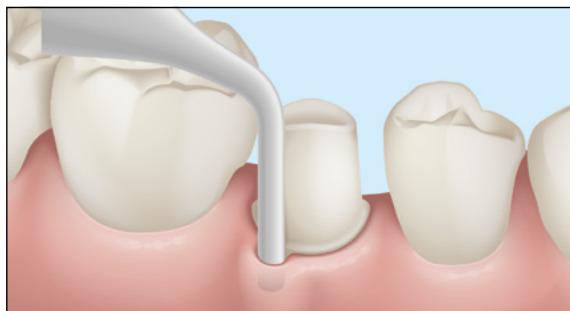


In den Sulkus eingebrachte Compulenspitze

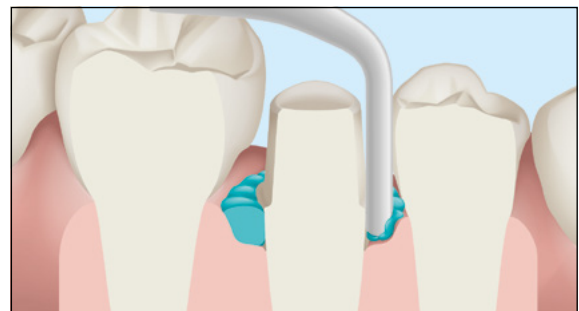

Applikation der Retraktionspaste

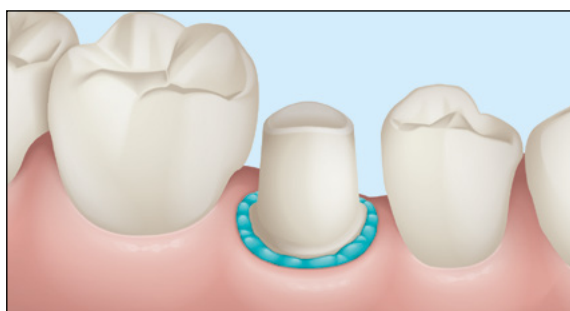

Die Paste im Sulkus einwirken lassen, um die Gingivaretraktion zu ermöglichen

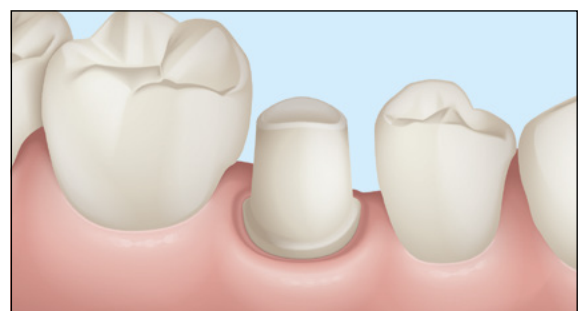

Die Retraction des Gewebes erfolgt mechanisch

Exzellente Ergebnisse in der Implantatprothetik

Bei Implantatabformungen ist die präzise Übertragung der oralen Situation auf das Arbeitsmodell entscheidend für die Erstellung der passgenauen Suprakonstruktion. Nur wenn die Position der Abformpfosten exakt festgehalten und wiedergegeben wird, ist die spätere Passgenauigkeit im Patientenmund garantiert. Honigum Pro sorgt mit seinen einzigartigen Eigenschaften auch in der Implantatprothetik für exzellente Ergebnisse.

- Mit seiner hervorragenden Fließfähigkeit umschließt Honigum Pro besonders gut die Abformpfosten bzw. Transferkappchen und fixiert diese zuverlässig. Torsionen werden durch das schnelle Abbindeverhalten und die hohe Endhärte – vor allem bei Honigum Pro Heavy – verhindert.
- Durch die optimale Standfestigkeit verbleibt das Material dann aber an der applizierten Stelle und gibt Gingivastrukturen detailgenau wieder – Ihre Garantie für ein harmonisches Eingliedern der Implantatprothetik in den Gingivaverlauf.



Unser Tipp:

Honigum Pro steht Ihnen in verschiedenen Varianten zur Verfügung, die sich genau nach Ihren Anforderungen kombinieren lassen. So verkürzen die Fast-Varianten von Honigum Pro die Behandlungszeiten noch weiter, während sich bei kombinierten Arbeiten aus Implantaten und präparierten Zähnen eine Mischung aus Honigum Pro Heavy und Honigum Pro Light in der Doppelmischtechnik empfiehlt. Bei einer reinen Implantatabformung eignet sich Honigum Pro Heavy auch als Monophasen-Abformmaterial.

Handfeste Vorteile für Ihre tägliche Arbeit

Honigum Pro Light

Hochpräzises Korrekturabformmaterial auf Basis von A-Silikon in Light-Konsistenz

Anwendungsgebiete:

Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

Produktvorteile:

- Intelligente Fließeigenschaften und außergewöhnliche Standfestigkeit
- Gute Hydrophilie
- Aufzeichnung feinsten Details
- Extrem hohe Reißzähigkeit
- Gut lesbarer Farbkontrast



Honigum Pro Mono

Monophasen-Abformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete:

Kronen- und Brückenabformungen, Inlay-, Onlay- und Funktionsabformungen sowie Druckstellenermittlung und Überabformungen aller Art (z. B. für Implantate)

Produktvorteile:

- Präzision in nur einem Schritt
- Leichte und sichere Entnahme
- Gute Hydrophilie und überlegenes Anfließverhalten
- Zeichnungsscharfe Darstellung der Präparationsgrenze
- Sehr hohe Reißfestigkeit



Honigum Pro Heavy

Präzisions-Abformmaterial auf Basis von A-Silikon in Heavy-Konsistenz

Anwendungsgebiete:

Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen, Überabformungen aller Art (z. B. für Implantate)

Produktvorteile:

- Hohe finale Endhärte
- Angenehmer Einbringwiderstand
- Leichte und sichere Entnahme
- Gleichbleibend homogene, blasenfreie Materialqualität



Honigum Pro Putty

Präzisions-Abformmaterial in Putty-Konsistenz auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete:

Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

Produktvorteile:

- Hervorragendes Rückstellvermögen
- Sehr gute Dimensionsstabilität
- Von Hand formbar oder echte Putty-Konsistenz aus der DMG MixStar-Kartusche
- Sehr gute Reißfestigkeit



Mehr zu Honigum Pro:
www.dmg-dental.com



Honigum Pro

Für wahre Abform-Meisterwerke

Handelsformen

Honigum Pro Light

Packung:	Vorteilspackung:	Zubehör:
2 Kartuschen à 50 ml	8 Kartuschen à 50 ml	1 Automix Dispenser Type 50 1:1
10 Automix Tips Yellow 1:1	40 Automix Tips Yellow 1:1	50 Automix Tips Yellow 1:1
10 Intraoral Tips Yellow	40 Intraoral Tips Yellow	50 Intraoral Tips Yellow
Honigum Pro Light	Honigum Pro Light	
Honigum Pro Light Fast	Honigum Pro Light Fast	
REF 929831	REF 929835	REF 909507
REF 929832	REF 929836	REF 909200
		REF 909222

Honigum Pro Mono

Packung:	Vorteilspackung:	Zubehör:
2 Kartuschen à 50 ml	8 Kartuschen à 50 ml	1 MixStar eMotion 230 V Int.
4 Automix Tips Green 1:1	16 Automix Tips Green 1:1	50 MixStar Tips Blue
4 Intraoral Tips Yellow	16 Intraoral Tips Yellow	1 Automix Dispenser Type 50 1:1
Honigum Pro Mono	Honigum Pro Mono	50 Automix Tips Green 1:1
Honigum Pro Mono Fast	Honigum Pro Mono	50 Intraoral Tips Transparent
REF 929830	REF 929834	1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive
REF 929976		REF 920480
		REF 903334
		REF 909507
		REF 909490
		REF 909400
		REF 909394
1 Kartusche à 380 ml	5 Kartuschen à 380 ml	
10 MixStar Tips Blue	50 MixStar Tips Blue	
Honigum Pro Mono	Honigum Pro Mono	
Honigum Pro Mono Fast	Honigum Pro Mono Fast	
REF 929568	REF 929569	
REF 929978	REF 929979	

Honigum Pro Heavy

Packung:	Vorteilspackung:	Zubehör:
2 Kartuschen à 50 ml	8 Kartuschen à 50 ml	1 MixStar eMotion 230 V Int.
4 Automix Tips Green 1:1	16 Automix Tips Green 1:1	50 MixStar Tips Blue
Honigum Pro Heavy	Honigum Pro Heavy	1 Automix Dispenser Type 50 1:1
Honigum Pro Heavy Fast	Honigum Pro Heavy	50 Automix Tips Green 1:1
REF 929766	REF 929837	1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive
REF 929838		REF 900480
		REF 903334
		REF 909507
		REF 909490
		REF 909394
1 Kartusche à 380 ml	5 Kartuschen à 380 ml	
10 MixStar Tips Blue	50 MixStar Tips Blue	
Honigum Pro Heavy	Honigum Pro Heavy	
Honigum Pro Heavy Fast	Honigum Pro Heavy Fast	
REF 929537	REF 929538	
REF 929638	REF 929637	

Honigum Pro Putty

Packung:	Vorteilspackung:	Zubehör:
1 Kartusche à 380 ml	5 Kartuschen à 380 ml	1 MixStar eMotion 230 V Int.
10 MixStar Tips Blue	50 MixStar Tips Blue	50 MixStar Tips Blue
Honigum Pro Putty	Honigum Pro Putty	1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive
REF 929374	REF 929375	REF 900480
		REF 903334
		REF 909394
2 Dosen à 450 ml	8 Dosen à 450 ml	
Honigum Pro Putty Soft	Honigum Pro Putty Soft	
Honigum Pro Putty Soft Fast	Honigum Pro Putty Soft Fast	
Honigum Pro Putty Rigid Fast	Honigum Pro Putty Rigid Fast	
REF 929364	REF 929369	
REF 929365	REF 929370	
REF 929366	REF 929371	

DMG Retraction Paste

Packung:	Zubehör
25 Compulen à 0,37 g	1 Safetip Dispenser
REF 919381	1 Safetip Dispenser Pro
	REF 213122
	REF 220829

Die perfekte Ergänzung: Entdecken Sie unsere Produktfamilie für die Prothetik

Entdecken Sie die umfassende Produktpalette von DMG für die Herstellung, Befestigung, Erweiterung und Reparatur von Langzeitprovisorien. Die Produkte wurden speziell entwickelt, um Ihnen in jeder Phase

eine optimale Unterstützung zu bieten. Von der präzisen Herstellung bis zur dauerhaften Befestigung - verlassen Sie sich auf herausragende Ergebnisse und eine langanhaltende Ästhetik.



4

Langzeit- Provisorium

↳ Luxatemp MaxProtect

Hochstabiles und zugleich ästhetisches Langzeitprovisorium, Haltbarkeit 1 Jahr

↳ Luxatemp Fluorescence

Das ideale Material für passgenaue Provisorien mit natürlicher Ästhetik.

↳ Luxatemp Star

Überzeugt mit Top-Werten in der Biege- und Bruchfestigkeit - das macht hochästhetische Provisorien stabiler als je zuvor.

↳ Luxatemp Plus

Seit Jahrzehnten weltweit das Material der Wahl für passgenaue temporäre Versorgungen.

5

Glanz und Schutz

↳ Luxatemp Glaze & Bond

Hochglanz ohne Politur
Sehr gute Haftvermittlung zu Reparaturmaterialien

6

Zementierung

↳ PermaCem 2.0

Selbstadhäsiver Zement. Herausragende Haftung für permanente Befestigung

↳ TempoCem NE

Optimale Haftung und Entfernbarkeit ohne Eugenol

↳ TempoCem ID

Exzellente Ästhetik dank optimaler Transparenz

7

Erweiterung und Reparatur

↳ LuxaFlow Star

Perfekt zur Erweiterung und Reparatur von Provisorien

Zusammen
ein Lächeln voraus

