



Für wahre Abform-  
Meisterwerke

Honigum Pro



Macht beim Abformen,  
was Sie wollen:  
**Honigum Pro**

# Standfest, wo es sein muss – fließfähig, wenn es fließen soll

Honigum Pro erleichtert Ihnen alle Abformaufgaben im Dentalbereich und wurde speziell für die Implantatprothetik entwickelt.

Das einzigartige Präzisions-A-Silikon bietet Ihnen überzeugende Vorteile:

- Hohe Präzision und saubere Handhabung
- Kein Tropfen beim Einbringen, kein unerwünschtes Wegfließen
- Hervorragende Fließfähigkeit unter Druck
- Sichere Entnahme durch außergewöhnliche Reißfähigkeit
- Exakte Abformungen
- Lange Verarbeitungszeit bei kurzer Mundverweildauer dank der »Snap-Set«-Technologie




1.1 Applizieren des Light-Materials.

Profitieren Sie von den Besonderheiten von Honigum Pro bei Ihrer täglichen Arbeit. Denn die DMG patentierte Materialstruktur sorgt schnell, sicher und sauber für präzise Ergebnisse und erzielt damit Topwerte in Alltags-tests und Studien – bei Patienten und Zahnärzten gleichermaßen.

Dank seiner ausgezeichneten Standfestigkeit, wenn kein Druck ausgeübt wird, kann Honigum Pro sicher eingebracht werden und verbleibt an der applizierten Stelle. Unter Druck, zum Beispiel beim Einbringen des Löffels, erreicht das Material kleinste Räume auch im feuchten Milieu zuverlässig und sorgt damit für exakte Abformungen. Entscheiden Sie, wann Honigum Pro standfest bleibt und wann es fließt.



2.1 Einsetzen des befüllten Abformlöffels mit Honigum Pro Putty und Honigum Pro Light.

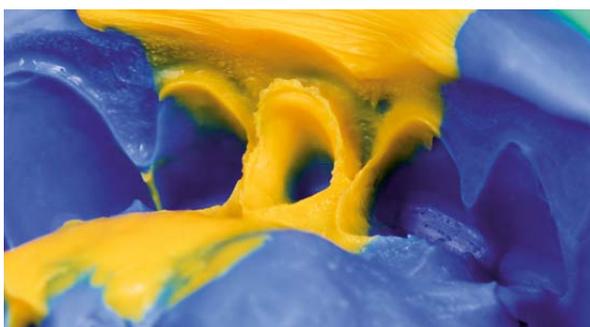

1.2 Der homogene Abdruck als Ergebnis.



2.2 Detailgetreue Abformung mit Honigum Pro Putty und Honigum Pro Light.


# Honigum Pro – handfeste Vorteile für die tägliche Arbeit

Abformmaterialien müssen vor allem beim Einsatz unter Feuchtigkeit überzeugen. Die spezielle Kristallstruktur von Honigum Pro, die rheologisch aktive Matrix, bietet dabei den entscheidenden Mehrwert für Sie und Ihre Patienten.

Im Test und Vergleich mit Mitbewerberprodukten zeigt Honigum Pro im Bereich der subgingivalen Präparationsgrenze **das beste Anfließverhalten unter feuchten Bedingungen** im künstlichen Sulkus. Das optimale Zusammenspiel aus guter Hydrophilie und einzigartigem rheologischem Verhalten garantiert Ihnen absolute Genauigkeit bei der Abformung.


Doch Honigum Pro bietet Ihnen in der täglichen Arbeit einen weiteren, wesentlichen Vorteil. Die **exzellente Kombination aus Reißfestigkeit und Dehnfestigkeit** – wissenschaftlich als Reißzähigkeit oder Toughness bezeichnet – ist für die sichere Entnahme aus dem Mund entscheidend. Auch bei diesem Faktor setzt sich Honigum Pro von anderen Produkten ab, stellt damit die höchste Qualität der Restauration sicher und spart dadurch gleichermaßen Zeit und Geld. Denn eine Abformung, die bei der Entnahme aus dem Mund reißt, ist eine verlorene Abformung.

## Eindringtiefe in den feuchten Sulkus

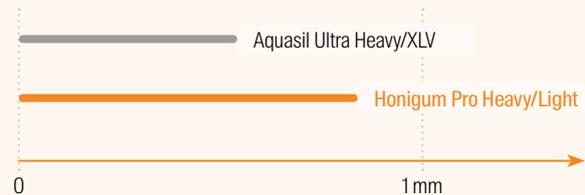

Honigum Pro zeigt hier die beste Eindringtiefe in den Sulkus für eine detailgetreue Abformung.<sup>2</sup>

## Reißzähigkeit

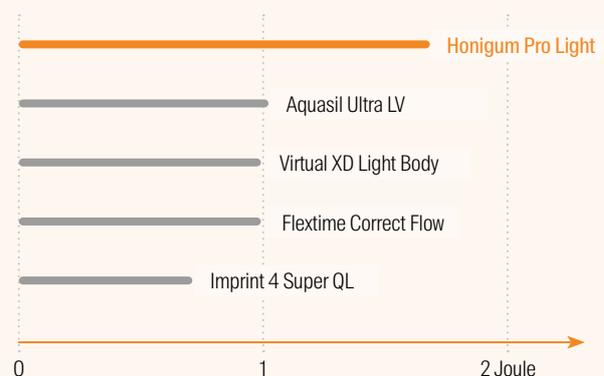

Honigum Pro Light zeigt herausragende Ergebnisse in der Reißzähigkeit – gut für eine sichere Entnahme.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Quelle: DMG interne Messung, Data on file, 2011.


<sup>2</sup> Quelle: Prof. Dr. B. Wöstmann, Justus-Liebig-Universität Gießen, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik.

# »Snap-Set«-Technologie für maximalen Komfort

Großzügige Verarbeitungszeit bei verkürzter Mundverweildauer – die »Snap-Set«-Technologie von DMG berücksichtigt die Bedürfnisse von Zahnarzt und Patient gleichermaßen.


- Honigum Pro verkürzt die **Mundverweildauer** und sorgt damit für deutlich mehr **Komfort** während der Behandlung.
- Dadurch reduziert sich der Stress für Patient und behandelnden Zahnarzt auf ein Minimum.
- Der Zahnarzt kann **entspannt und sicher arbeiten** – auch intraoral – denn die Viskosität bleibt über einen großzügigen Zeitraum konstant.
- Verzerrungen durch bereits abgebundenes Material werden vermieden.
- **Schnellere Vernetzungszeiten** verringern Ungenauigkeiten durch Mikrobewegungen.

## »Snap-Set«-Technologie Honigum Pro

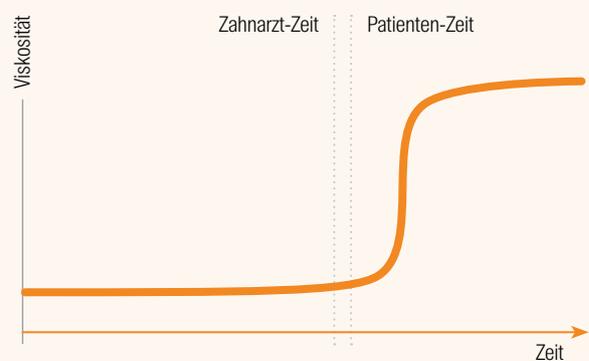

Komfortable Verarbeitungszeit bei kurzer Mundverweildauer.  
Maximaler Komfort für Zahnarzt und Patient mit Honigum Pro.<sup>1</sup>

## Verarbeitungszeiten herkömmlicher Abformmaterialien

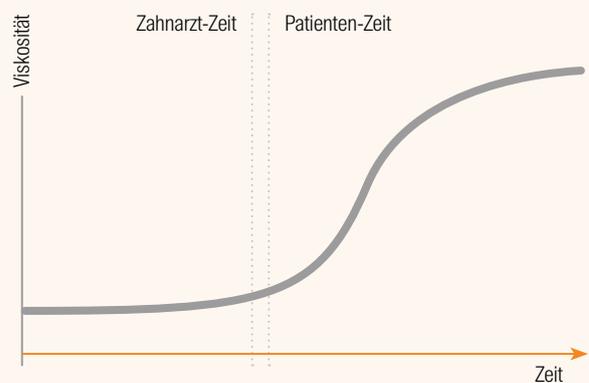

<sup>1</sup> Quelle: DMG interne Messung, Data on file, 2011.

# Einfacher, schneller und sicherer: der MixStar eMotion

Dosieren, Mischen und Ausbringen von Honigum Pro leicht gemacht.

- **Einfacher:** Mit nur einem Knopfdruck und beiden Timern für die Verarbeitungszeit und Mundverweildauer bedienen Sie den MixStar eMotion intuitiv und doch nach individuellen Anforderungen.
- **Schneller:** Befüllen Sie Spritzen oder Abformlöffel in drei Geschwindigkeitsstufen und sparen Sie dabei bis zu 20 Sekunden gegenüber dem Vorgängermodell.
- **Sicherer:** Für die exakte Dosierung und minimalen Materialverwurf sorgt die elektronische Kontrolle. Fehler werden durch das Speichern der korrekten Zeiten für Verarbeitung und Mundverweildauer vermieden.



Der MixStar eMotion bietet Ihnen elektrische Perfektion bei der Verarbeitung von Honigum Pro.

## DMG Retraction Paste – Ihr unkomplizierter Abformhelfer



Die DMG Retraction Paste ist die ideale Ergänzung für passgenaue Abformungen und Restaurationen mit Honigum Pro.

- Eine individuell biegsame Compule ermöglicht einfachste Applikationen an jeder Stelle im Patientenmund.
- Das Material verbleibt an der applizierten Stelle, entfaltet dort optimal seine Wirkung und ist gut im Sulkus sichtbar.
- Die homogene Konsistenz sorgt für optimale Ergebnisse bei der temporären Sulkuserweiterung.

# Exzellente Ergebnisse in der Implantatprothetik

Bei Implantatabformungen ist die präzise Übertragung der oralen Situation auf das Arbeitsmodell entscheidend für die Erstellung der passgenauen Suprakonstruktion. Nur wenn die Position der Abformpfosten exakt festgehalten und wiedergegeben wird, ist die spätere Passgenauigkeit im Patientenmund garantiert. Honigum Pro sorgt mit seinen einzigartigen Eigenschaften auch in der Implantatprothetik für exzellente Ergebnisse.

- Mit seiner hervorragenden Fließfähigkeit umschließt Honigum Pro besonders gut die Abformpfosten bzw. Transferkappchen und fixiert diese zuverlässig. Torsionen werden durch das schnelle Abbindeverhalten und die hohe Endhärte – vor allem bei Honigum Pro Heavy – verhindert.
- Durch die optimale Standfestigkeit verbleibt das Material dann aber an der applizierten Stelle und gibt Gingivastrukturen detailgenau wieder – Ihre Garantie für ein harmonisches Eingliedern der Implantatprothetik in den Gingivaverlauf.



## Unser Tipp:

Honigum Pro steht Ihnen in verschiedenen Varianten zur Verfügung, die sich genau nach Ihren Anforderungen kombinieren lassen. So verkürzen die Fast-Varianten von Honigum Pro die Behandlungszeiten noch weiter, während sich bei kombinierten Arbeiten aus Implantaten und präparierten Zähnen eine Mischung aus Honigum Pro Heavy und Honigum Pro Light in der Doppelmischtechnik empfiehlt. Bei einer reinen Implantatabformung eignet sich Honigum Pro Heavy auch als Monophasen-Abformmaterial.

**Eine Übersicht zu den verschiedenen Varianten von Honigum Pro finden Sie auf der nächsten Seite.**



# Handfeste Vorteile für Ihre tägliche Arbeit

## Honigum Pro Light

Hochpräzises Korrekturabformmaterial auf Basis von A-Silikonem in Light-Konsistenz

### Anwendungsgebiete:

Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

### Vorteile für den Zahnarzt:

- Intelligente Fließigenschaften und außergewöhnliche Standfestigkeit
- Sehr gute Hydrophilie
- Aufzeichnung feinsten Details
- Sehr hohe Reißähigkeit
- Gut lesbarer Farbkontrast

## Honigum Pro Putty

Präzisions-Abformmaterial in Putty-Konsistenz auf Basis von A-Silikonem

### Anwendungsgebiete:

Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

### Besonderheiten:

Echte Putty-Konsistenz aus der DMG MixStar-Kartusche

### Vorteile für den Zahnarzt:

- Hervorragendes Rückstellvermögen
- Sehr gute Dimensionsstabilität
- Von Hand formbar

## Honigum Pro Heavy

Präzisions-Abformmaterial auf Basis von A-Silikonem in Heavy-Konsistenz

### Anwendungsgebiete:

Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen, Überabformungen aller Art (z. B. für Implantate)

### Vorteile für den Zahnarzt:

- Hohe finale Endhärte
- Angenehmer Einbringwiderstand
- Leichte und sichere Entnahme
- Gleichbleibend homogene, blasenfreie Materialqualität

## Honigum Pro Mono

Monophasen-Abformmaterial auf Basis von A-Silikonem in Medium-Konsistenz

### Anwendungsgebiete:

Kronen- und Brückenabformungen, Inlay-, Onlay- und Funktionsabformungen sowie Druckstellenermittlung und Überabformungen aller Art (z. B. für Implantate)

### Vorteile für den Zahnarzt:

- Präzision in nur einem Schritt
- Leichte und sichere Entnahme
- Gute Hydrophilie und überlegenes Anfließverhalten
- Zeichnungsscharfe Darstellung der Präparationsgrenze
- Sehr hohe Reißfestigkeit



Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:

[www.dmg-dental.com](http://www.dmg-dental.com)

## Handelsformen

### Honigum Pro Light

#### Packung:

- 2 Kartuschen à 50 ml
- 10 Automix Tips Yellow 1:1
- 10 Intraoral Tips Yellow

Honigum Pro Light  
Honigum Pro Light Fast

REF 929831  
REF 929832

#### Vorteilspackung:

- 8 Kartuschen à 50 ml
- 40 Automix Tips Yellow 1:1
- 40 Intraoral Tips Yellow

Honigum Pro Light  
Honigum Pro Light Fast

REF 929835  
REF 929836

### Honigum Pro Mono

#### Packung:

- 2 Kartuschen à 50 ml
- 4 Automix Tips Green 1:1
- 4 Intraoral Tips Yellow

Honigum Pro Mono  
Honigum Pro Mono Fast

REF 929830  
REF 929976

#### Vorteilspackung:

- 8 Kartuschen à 50 ml
- 16 Automix Tips Green 1:1
- 16 Intraoral Tips Yellow

Honigum Pro Mono  
Honigum Pro Mono Fast

REF 929834  
REF 929977

- 1 Kartusche à 380 ml
- 10 MixStar Tips Blue

Honigum Pro Mono  
Honigum Pro Mono Fast

REF 929568  
REF 929978

- 5 Kartuschen à 380 ml
- 50 MixStar Tips Blue

Honigum Pro Mono  
Honigum Pro Mono Fast

REF 929569  
REF 929979

### Honigum Pro Heavy

#### Packung:

- 2 Kartuschen à 50 ml
- 4 Automix Tips Green 1:1

Honigum Pro Heavy  
Honigum Pro Heavy Fast

REF 929766  
REF 929838

#### Vorteilspackung:

- 8 Kartuschen à 50 ml
- 16 Automix Tips Green 1:1

Honigum Pro Heavy  
Honigum Pro Heavy Fast

REF 929837  
REF 929839

- 1 Kartusche à 380 ml
- 10 MixStar Tips Blue

Honigum Pro Heavy  
Honigum Pro Heavy Fast

REF 929537  
REF 929638

- 5 Kartuschen à 380 ml
- 50 MixStar Tips Blue

Honigum Pro Heavy  
Honigum Pro Heavy Fast

REF 929538  
REF 929637

### Honigum Pro Putty

#### Packung:

- 1 Kartusche à 380 ml
- 10 MixStar Tips Blue

Honigum Pro Putty

REF 929374

#### Vorteilspackung:

- 5 Kartuschen à 380 ml
- 50 MixStar Tips Blue

Honigum Pro Putty

REF 929375

- 2 Dosen à 450 ml

Honigum Pro Putty Soft  
Honigum Pro Putty Soft Fast  
Honigum Pro Putty Rigid Fast

REF 929364  
REF 929365  
REF 929366

- 8 Dosen à 450 ml

Honigum Pro Putty Soft  
Honigum Pro Putty Soft Fast  
Honigum Pro Putty Rigid Fast

REF 929369  
REF 929370  
REF 929371

### Honigum Pro Scan

#### Packung:

- 2 Kartuschen à 50 ml
- 4 Automix Tips Green 1:1

Honigum Pro Scan Heavy

REF 929983

#### Packung:

- 1 Kartusche à 380 ml
- 10 MixStar Tips Blue

Honigum Pro Scan Heavy

REF 929981

- 2 Kartuschen à 50 ml
- 10 Automix Tips Yellow 1:1
- 10 Intraoral Tips Yellow

Honigum Pro Scan Light

REF 929984

### DMG Retraction Paste

#### Packung:

- 25 Compulen à 0,37 g

REF 919381

#### Zubehör:

- 1 Automix Dispenser Type 50 1:1
- 50 Automix Tips Yellow 1:1
- 50 Intraoral Tips Yellow
- 50 Automix Tips Green 1:1
- 50 Intraoral Tips Transparent

REF 909507  
REF 909200  
REF 909201  
REF 909490  
REF 909400

#### Zubehör:

- 1 Safetip Dispenser
- 1 Safetip Dispenser Pro

REF 213122  
REF 220829

- 1 MixStar eMotion 230 V Int.
- 50 MixStar Tips Blue

REF 900480  
REF 903334

- 1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive

REF 909394

# Honigum Pro

## Für wahre Abform-Meisterwerke



Zusammen  
ein Lächeln voraus



**DMG**

**Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH**

Elbgastraße 248 22547 Hamburg Germany

Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222

info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com

www.facebook.com/dmgdental

