



LuxaPick-up

Packung: 1 Kartusche 76 g, 15 Automix-Tips, Farbe Rosa REF 214007

Luxatemp-Glaze & Bond

Packung: 1 Flasche à 5 ml, 25 Pinsel REF 211927

Zubehör:
1 Automix-Dispenser Type 50 10:1 REF 110411
1 Automix-Plunger 50 10:1 REF 110412
45 Automix-Tips Blue 10:1 REF 110409

DMG
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany
Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222
info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com
www.facebook.com/dmgdental



000909/#5_2018-03



LuxaPick-up

Der Prothesen-Profi,
der mehr kann.





Der Prothesen-Profi,
der mehr kann.

LuxaPick-up.

Einfache Fixierung und passgenaue Unterfütterung von Prothesen.

Wenn es um perfekt sitzende Prothesen geht, erleichtert LuxaPick-up Ihnen die Arbeit gleich mehrfach. Das gingiva-farbene Composite auf Basis multi-funktionaler Methacrylate ist Ihr Spezialist für:

Direkte harte Unterfütterung als Ausgleich von Veränderungen im Schleimhautlager


Sicheren Halt durch Stabilisierung mithilfe von Retentionselementen (Pick-up-Technik)

Die Retentionselemente können direkt intraoral einpolymerisiert werden. Das gewährleistet einen spannungsfreien, sicheren Halt auf Implantaten. Der herausnehmbare Zahnersatz kann ganz einfach an veränderte Schleimhautlager angepasst werden – dank direkter Chairside-Anwendung.


LuxaPick-up bietet so die schnelle und kostengünstige Möglichkeit, die Funktionalität wiederherzustellen. Kein Zeitverzug durch externe Laborarbeiten, keine Ungenauigkeiten.

GUTE GRÜNDE:


- Direkte harte Unterfütterung von Zahnersatz
- Fixierung von Sekundärteilen und Verbindungselementen in implantatgetragenen Prothesen
- Besonders biokompatibel: ohne MMA, ohne Peroxid
- Spannungsfreier, zuverlässiger Halt
- Direkte Chairside-Anwendung
- Auch für Prothesenreparatur und Individualisierung von Interimzahnersatz

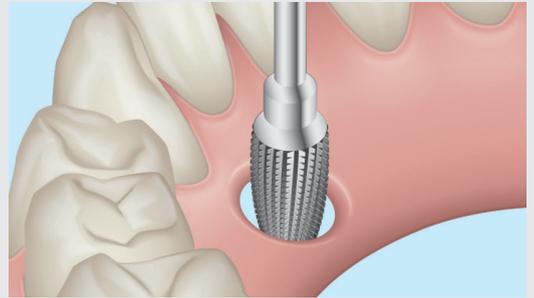


Eine zirkuläre unter sich gehende Aussparung in die Prothesenbasis fräsen.

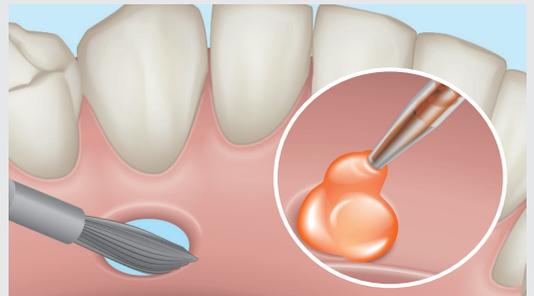

Luxatemp-Glaze & Bond auftragen und licht härten. Anschließend LuxaPick-up applizieren.

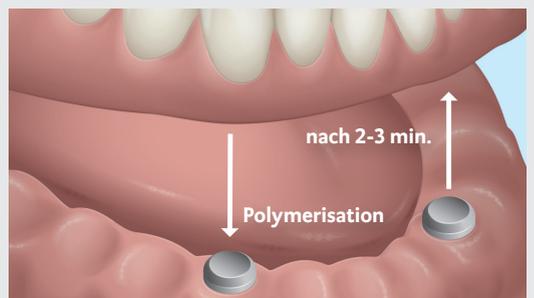

Prothese mit mäßigem Druck einsetzen und fixieren.

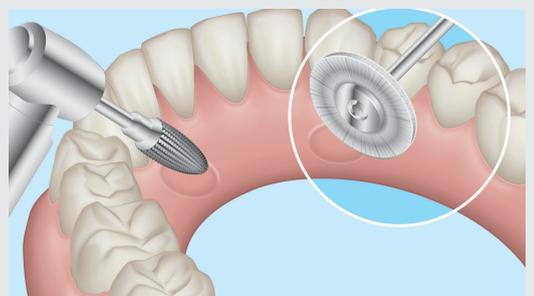

Überschüsse abschleifen und angeschliffene Bereiche abschließend polieren.