



## 预防性护理主角 的出色能力

Flairesse Paste · Flairesse Gel ·  
Flairesse Foam · Flairesse Varnish  
预防性牙齿护理





## 一体化系统 为您带来综合的预防性牙齿护理

加入我们,成为 Flairesse 预防性牙齿护理主角:从清洁到稳固牙齿,我们的一体化系统旨在为您的患者提供出色的从清洁到加固的一系列保护功能。有多种口味可供选择,让牙齿护理更加愉悦。Flairesse 抛光膏、凝胶、泡沫和氟保护漆可提供综合性保护,确保您随时都能获得正确的预防性护理。这让每个治疗步骤都变得更简单、更愉快、更高效。因此,您不仅能为患者提供非常便利的保护,还能让他们拥有更灿烂的笑容。

### Flairesse — 为患者和牙科医护人员带来的益处

对于牙科医护人员:

- + 易于使用和涂抹
- + 高效配方
- + 功能性粘稠度:  
无飞溅或滴落
- + 适当同步的一体化系统
- + 适用于儿童、成人和老年人

对于患者:

- + 快速涂抹
- + 高效防龋
- + 感觉舒适:  
有凝胶和泡沫两种剂型可选
- + 无不适感
- + 有多种口味可供选择

## 使用便捷。功效强大。 强大的预防性治疗系统。

Flairesse 是优秀的预防性牙齿护理系统,其设计旨在大幅提高易用性,让患者倍感舒适。每种优质产品都具有强大的单独使用性能,能有效促进牙齿健康。

所有 Flairesse 产品均含有氟化物和木糖醇,适合素食主义者,不含任何麸质、糖精、阿斯巴甜、乳糖或其他已知的致敏原。

### 功效强大。使用便捷。预防性治疗。



1 清洁和抛光

**Flairesse Paste**

作为预防性治疗的一个环节,三种磨砂等级的预防性抛光膏用于专业洁牙及牙齿表面的抛光。



2 强效牙釉质增强剂

**Flairesse Gel**

凝胶用于在去除牙菌斑和色素后对牙釉质进行再矿化和氟化处理,也可整合到定制的预防性治疗计划中。

**Flairesse Foam**

用于强化牙釉质的预防性氟泡沫是凝胶的轻型替代品,具有相同的再矿化特性,并且给人一种愉悦的感觉,深受患者喜爱。



3 用于保护敏感性牙齿的封闭剂

**Flairesse Varnish**

隐形、耐湿的氟保护漆,用于预防龋齿,缓解敏感性牙齿或牙颈部暴露的疼痛。

# Flairesse Paste

## 用于较洁净、彻底抛光牙齿的优秀产品

Flairesse 预防性抛光膏能可靠去除硬质和软质牙菌斑以及由咖啡、茶或烟草引起的外源性着色,并且不会飞溅或滴落。提供三种不同的磨砂等级,可实现温和、彻底的清洁效果。

有薄荷和甜瓜两种清爽口味可供选择,在清洁牙齿的过程中让人瞬间倍感清新。确保在抛光膏洗净后,患者的牙

齿立即感到光滑柔软。Flairesse 抛光膏含有氯化钠和木糖醇,能防止牙齿脱矿并抑制致龋细菌的生长,还能提供持久的龋齿保护。

经济实惠的管状抛光膏还是方便的一次性独立包装抛光膏?您可以任意选择最适合自己的预防性治疗产品。



### 舒适怡人

有两种清新口味  
可供选择



### 无飞溅

使用方便、  
洁净



### 三种磨砂等级

提供粗、中、细三种等级,  
可满足各种需求



### 清洁可靠、 温和

打造健康洁白的牙齿



### 保护 牙齿

含木糖醇和氟化物





# Flairesse Gel

Flairesse 凝胶不含任何二氧化钛、动物产品或微塑料，具有高度可持续性。包装由可回收塑料和纸张制成。因此，凝胶完善了这一预防性治疗系统，而不会对环境造成影响。

Flairesse 凝胶的氟化物含量高达 12,300 ppm，此外还含有木糖醇，能在专业洁牙后促进牙釉质的再矿化和强化，并抑制产酸细菌的生长。

除了提供出色的保护外，60 秒的涂抹时间和舒适的涂抹系统(包括用于个别牙齿的托盘和抛光杯)也让患者受益良多。

涂抹后，只需将凝胶吐出，无需冲洗。既省时又省水。Flairesse 凝胶有薄荷、甜瓜和草莓三种清新口味可供选择，能够大幅提高患者满意度，并且不含常见的致敏原。

凝胶稠度适中：不会滴落，且易于控制每次的用量。确保每位患者都能获得满意的效果。



## 自由选择 强化牙釉质的优秀专家



**强化牙釉质**  
含木糖醇  
和氟化物



**使用方便**  
易于在  
托盘中使用



**患者满意**  
应用时间短，只  
需要 1 分钟



**舒适怡人**  
三种清新口味：甜瓜、薄荷和草莓



**两种产品 – 相同功效**  
在 Flairesse 凝胶  
和 Flairesse 泡沫之间进行选择

# Flairesse Foam

这种预防性氟泡沫是对 Flairesse 凝胶的有效补充，专为喜欢低稠度的患者配制。与凝胶一样，Flairesse 泡沫能强化和保护牙釉质，含氟量高达 12,300 ppm，只需 60 秒即可见效。添加木糖醇也使这种泡沫具有抑制龋齿的作用。

无论是否使用托盘，Flairesse 泡沫都能灵活使用，因此也适用于无法长时间保持嘴巴张开的患者。这使其成为名副其实的预防性主角。

在短时间的应用过程中，泡沫会使患者口腔内产生愉悦的感觉，让患者惊喜不已 – 尤其适用于儿童，他们往往喜

欢低稠度泡沫。此外，泡沫的稠度也使其不易被误吞。即使发生误吞的情况，也不必担心：与常规的含氟凝胶和抛光膏相比，泡沫中的氟含量要少 10 倍左右，但应用于牙齿表面时的转移量相同。与凝胶一样，吐出后无需冲洗。

Flairesse 泡沫有薄荷、甜瓜和草莓三种口味可供选择，采用便捷的输送枪包装，易于控制用量。



# Flairesse Varnish

## 专为高度敏感的牙齿配制

Flairesse 氟保护漆是一种快速、可靠地封闭牙本质小管的预防性保护漆，隐形且耐唾液。它能舒缓高度敏感的牙齿，封闭暴露的牙颈和牙根牙本质。由于含有木糖醇且氟化物浓度为 22,600 ppm，Flairesse 氟保护漆既能抗菌又能抑制龋齿。因此，它非常适合在专业洁牙后进行强化涂氟。

这种专业的氟保护漆可以系统地用于治疗疼痛，具有即时、明显和持久的舒缓作用，尤其适用于牙齿高度敏感的患者。

它有薄荷和甜瓜两种口味可供选择，一次性独立包装非常方便、卫生。灵活的封闭式一次性毛刷可确保高精度使用。



**缓解疼痛**  
舒缓敏感牙齿



**保护牙齿**  
含木糖醇和氟化物



**不可见**  
透明氟保护漆，自然美观



**舒适怡人**  
两种清新口味



# 综合性预防系统

## 四种优质的专业洁牙产品

### 产品简介


#### Flairesse Paste

	<b>薄荷味 细</b> 200 Single-use units @ 1.8 g 1 个抛光环 薄荷味 细	REF 220414
	<b>薄荷味 中</b> 200 Single-use units @ 1.8 g 1 个抛光环 薄荷味 中	REF 220415
	<b>薄荷味 粗</b> 200 Single-use units @ 1.8 g 1 个抛光环 薄荷味 粗	REF 220416

#### Flairesse Paste

	<b>薄荷味 细</b> 1 管 @ 75 毫升 薄荷味 细	REF 220417
	<b>薄荷味 中</b> 1 管 @ 75 毫升 薄荷味 中	REF 220418
	<b>薄荷味 粗</b> 1 管 @ 75 毫升 薄荷味 粗	REF 220419
	<b>甜瓜味 细</b> 1 管 @ 75 毫升 甜瓜味 细	REF 220423
	<b>甜瓜味 中</b> 1 管 @ 75 毫升 甜瓜味 中	REF 220424
	<b>甜瓜味 粗</b> 1 管 @ 75 毫升 甜瓜味 粗	REF 220425

#### Flairesse Varnish

	<b>薄荷味</b> 35 Single-use units @ 0.4 g 35 毛刷 薄荷味	REF 220404
	<b>甜瓜味</b> 35 Single-use units @ 0.4 g 35 毛刷 甜瓜味	REF 220405

#### Flairesse Gel

	<b>薄荷味</b> 1 瓶 @ 480 毫升 Gel 薄荷味	REF 225411
	<b>甜瓜味</b> 1 瓶 @ 480 毫升 Gel 甜瓜味	REF 225412
	<b>草莓</b> 1 瓶 @ 480 毫升 Gel 草莓	REF 225413

#### Flairesse Foam

	<b>薄荷味</b> 1 支注射剂 @ 125 g Foam 薄荷味	REF 220408
	<b>甜瓜味</b> 1 支注射剂 @ 125 g Foam 甜瓜味	REF 220409
	<b>草莓</b> 1 支注射剂 @ 125 g Foam 草莓	REF 220410



Flairesse

有效预防的理想选择:  
非常容易涂抹, 高效保护



有关 Flairesse 的更多信息, 请访问:  
[www.dmg-dental.com/prophylaxis-flairesse](http://www.dmg-dental.com/prophylaxis-flairesse)

**A smile ahead**  
together



**DMG**

**Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH**

Elbgastraße 248 22547 Hamburg Germany

Fon: +49,(0) 40.84 006-0 Fax: +49,(0) 40.84 006-222

info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com

www.facebook.com/dmgdental

