



La simbiosis perfecta
de durabilidad y estética

Luxatemp MaxProtect
Restauración provisional
de larga duración



Uso clínicamente probado
por 1 año

 **DMG**



¿Por qué elegir Luxatemp MaxProtect?

Luxatemp MaxProtect es un material con estabilidad duradera y propiedades mecánicas mejoradas, así como una prolongada **durabilidad** confirmada por un estudio clínico*. **Luxatemp MaxProtect** es el producto que debe usar, en particular, en los siguientes casos:

- Si su caso de tratamiento requiere una **fase de cicatrización prolongada** (por ejemplo, después de un tratamiento con implantes, un tratamiento periodontal o un tratamiento endodóntico).
- Si está buscando una solución estética **económica** para el paciente y **de alta durabilidad**.

*Véase la página 4.

Estabilidad extrema. Excelente estética. Fácil manipulación... y una restauración provisional convencional y de larga duración en una sola cita. Si está buscando un material rentable y revolucionario en muchos aspectos para restauraciones provisionales de larga duración, aquí lo tiene: Luxatemp MaxProtect.

Estabilidad
extraordinaria



1
cita

5

minutos
para crear
una corona



Comprobado por estudios
y **clínicamente**
testado




1 año

tiempo de uso

6



tonos

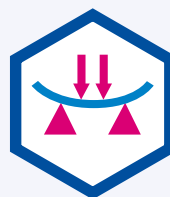


Resistencia a la flexión

118 MPa



Estabilidad
duradera del tono
 $\Delta E = 0.48^{***}$

Excelente
estética

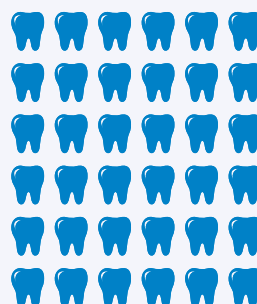

Rentable:

36

coronas con
solo un cartucho

La elección **adecuada**, en el momento **oportuno**.

Luxatemp MaxProtect es la mejor elección cuando se busca una máxima estabilidad y una restauración estética pero económica. Mejore las fases de cicatrización más largas con Luxatemp MaxProtect y aproveche larga durabilidad y su corto tiempo de

trabajo. Al optar por Luxatemp MaxProtect, estará ofreciendo a sus pacientes una restauración estética y la posibilidad de realizar restauraciones de larga duración de manera económica.

Indicaciones



↗ Espacios entre dientes



↗ Corrección de dientes desalineados



↗ Tratamiento de endodoncia



↗ Restauraciones estéticas



↗ Fracturas dentales



↗ Fases de cicatrización
(tratamiento periodontal/
tratamiento de implantes)

Los resultados hablan por sí solos. Y por Luxatemp MaxProtect.

Luxatemp MaxProtect: **el futuro de las restauraciones provisionales de alta calidad.** Gracias a la investigación y desarrollo, el conocido Luxatemp se ha mejorado para cumplir con las mayores exigencias. Además de la **estabilidad mecánica para** asegurar la protección de la estructura dental remanente y su función, Luxatemp MaxProtect ofrece **extraordinarias**

propiedades ópticas. El resultado del estudio clínico realizado confirma también **el alto nivel de satisfacción de los pacientes,** incluso, al usarlo por más de 1 año. Luxatemp MaxProtect: máxima protección y estética sorprendente para restauraciones provisionales de larga duración.

Fuente: estudio clínico (n.º de reg. NCT03160950)

Resultado del estudio clínico:

- ↗ Restauraciones extraordinarias por más de un año



Supera todas las expectativas. Y a la competencia.


Una comparación puede ser muy elocuente.

Por eso, decidimos comparar Luxatemp MaxProtect con la competencia.

El resultado: Luxatemp MaxProtect supera a competidores en cuanto a propiedades de alta estética y durabilidad. La resistencia a la flexión de 118 MPa y una


estabilidad del tono (ΔE) de 0,48 convierten claramente a Luxatemp MaxProtect en uno de los productos líderes del mercado. Estos valores excepcionales demuestran que Luxatemp MaxProtect no solo resiste las condiciones más exigentes, sino que también mantiene su estética a largo plazo.

Propiedades en un vistazo

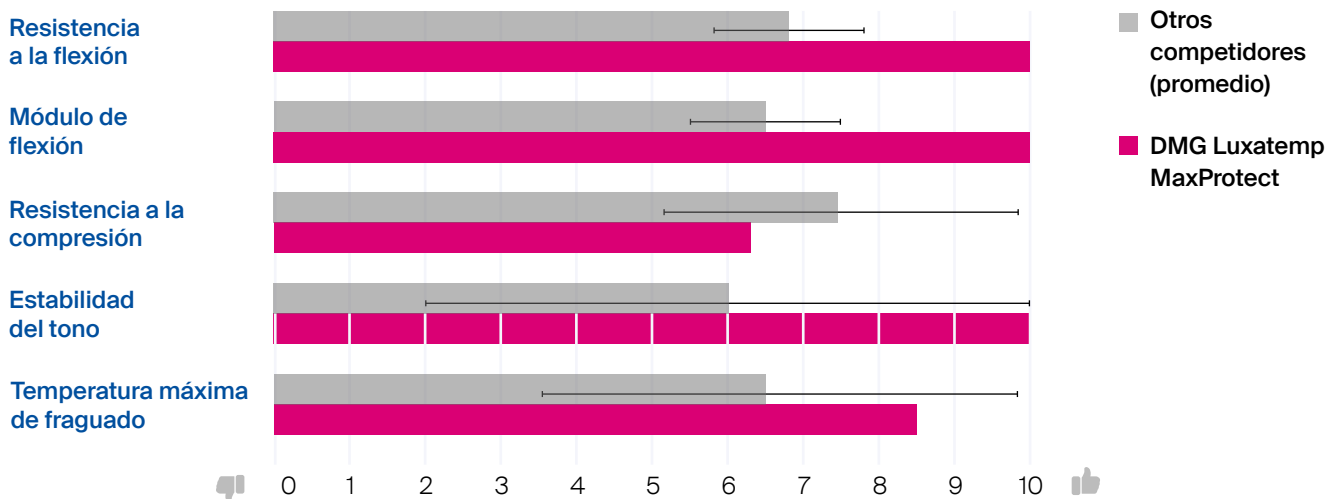


Resistencia a la flexión en detalle

Resistencia a la flexión / MPa

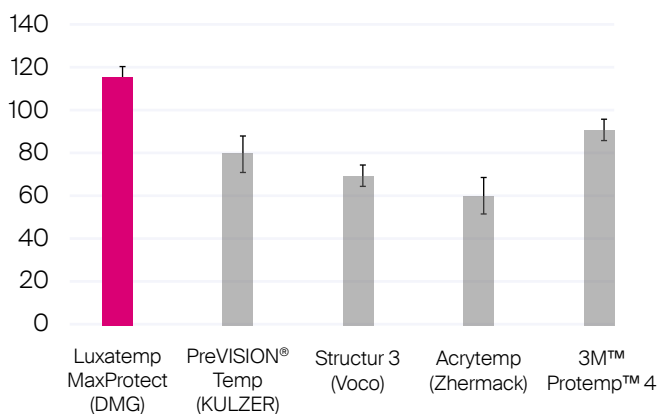

Estabilidad del tono en detalle

Cambio de tono 28 días / ΔE

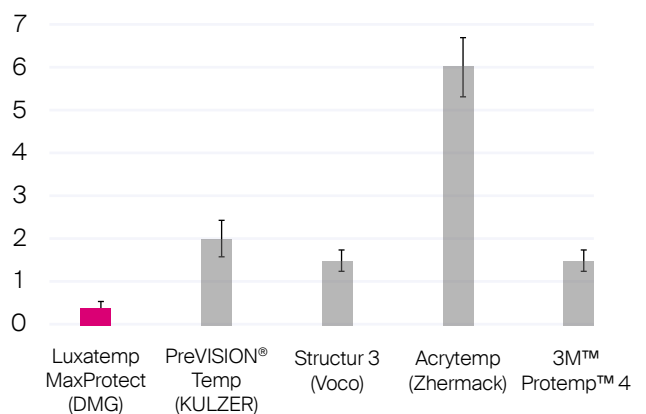


La comparación concluye que la superficie tiene una mayor suavidad.


La ampliación de 60x de las imágenes microscópicas muestra una superficie lisa y homogénea de Luxatemp MaxProtect tras la eliminación de la capa de barrillo dentinario.

Esta mayor suavidad conforma una base óptima para el pulido y demuestra la alta calidad de Luxatemp MaxProtect. Sin duda, un valor añadido para un trabajo eficiente.

Ampliación de 60x: la mayor suavidad de Luxatemp MaxProtect es evidente *después* de eliminar la capa de barrillo dentinario y *antes* de realizar el pulido:

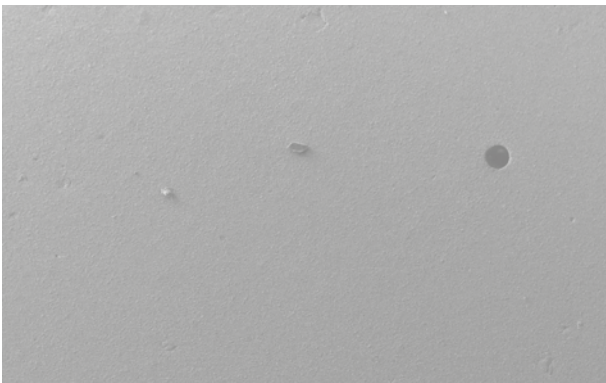

DMG Luxatemp MaxProtect

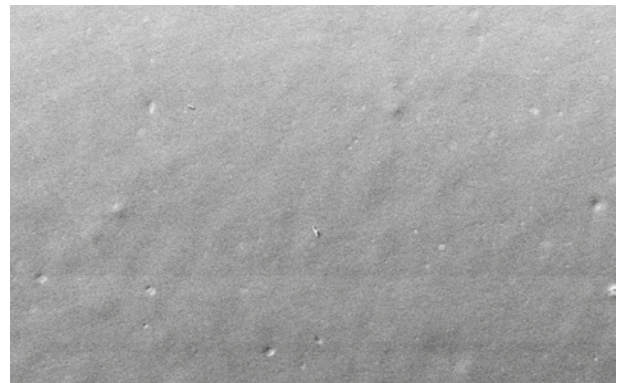

3M™ Protemp™ 4

Fuente: DMG, fotografía interna. Datos en archivo, 2024

MaxProtect: literalmente.



Luxatemp: una familia unida.

Luxatemp **lleva años** siendo sinónimo de puentes y restauraciones provisionales de ajuste preciso en todo el mundo. Gracias al nuevo Luxatemp MaxProtect, DMG lidera ahora la nueva generación de restauraciones provisionales de larga duración que combinan la **máxima estabilidad, la mejor estética posible y una**

gran durabilidad. Además de Luxatemp MaxProtect, DMG ofrece también otros materiales de alta calidad para realizar restauraciones provisionales, **por lo que podrá encontrar fácilmente el material adecuado con las propiedades que necesita.**

Ventajas y beneficios

Propiedades del material	
Alta resistencia a la fractura / resistencia a la flexión	<ul style="list-style-type: none">• Mayor durabilidad y resistencia al estrés• Sin rotura ni deformación• Seguro, eficaz y fiable• Especialmente adecuado para fases de cicatrización más largas• Garantiza máxima estabilidad y seguridad
Resistencia muy alta a la abrasión	<ul style="list-style-type: none">• Mayor durabilidad• Menor necesidad de seguimiento• Seguro y ahorra tiempo
Propiedades de superficie mejoradas	<ul style="list-style-type: none">• Fácil de pulir• Pulido rápido para ahorrar tiempo
Rápida dureza inicial	<ul style="list-style-type: none">• Eficiente para los dentistas• Comodidad para los pacientes
Baja contracción	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste preciso• Ahorra tiempo en el acabado
Manipulación	
Baja contracción durante la polimerización Excelente capacidad de pulido	<ul style="list-style-type: none">• Ahorra tiempo• Confianza en la calidad
Estética natural	
Fluorescencia natural	<ul style="list-style-type: none">• Aspecto natural• Resultado estético
Brillo duradero	<ul style="list-style-type: none">• Comodidad para los pacientes• Las encías permanecen sanas
Estabilidad duradera del tono	<ul style="list-style-type: none">• Para un tiempo de uso prolongado con una excelente estética
Biocompatibilidad	
No contiene metacrilato de metilo	<ul style="list-style-type: none">• Bajo potencial alergénico• Seguridad
Sistema Automix	
Sistema fiable para restauraciones provisionales	



Luxatemp Plus	Luxatemp Fluorescence	Luxatemp Star	Luxatemp MaxProtect
★★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★
★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
★★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★
★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★
★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★
★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★
★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★
★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★

El complemento perfecto: descubra nuestra familia de productos para prótesis.

Descubra la gama completa de productos de DMG para fabricación, cementación y mejora en la reparación de **restauraciones provisionales de larga duración con Luxatemp MaxProtect**. Nuestros productos se han desarrollado especialmente para ofrecerle el máximo

apoyo en cada fase del proceso de tratamiento provisional. Desde la fabricación precisa hasta la cementación permanente, puede confiar en obtener resultados extraordinarios y alcanzar una estética duradera.



DMG Retraction Paste
Retracción gingival eficaz con consistencia óptima



Silagum
Materiales consolidados de impresión con base de VPS con excelentes propiedades hidrofílicas

Honigum
Excepcional reproducción de detalles

Honigum Pro
Máxima precisión y buena manipulación. Con una limpia aplicación.



O-Bite
Registro de mordida preciso con una elevada dureza final y excelente resistencia a la fractura

LuxaBite
Material de registro de mordida de alta dureza final y excelente estabilidad cuando el paciente cierra la mandíbula.

Restauraciones provisionales de larga duración

↳ Luxatemp MaxProtect

Para restauraciones provisionales de larga duración muy estables y, al mismo tiempo, estéticas, hasta 1 año de uso

Brillo y protección

↳ Luxatemp Glaze & Bond

Alto brillo sin necesidad de pulido, excelente adhesión a materiales de reparación

Cementación

↳ PermaCem 2.0

Cemento autoadhesivo. Extraordinaria adhesión para cementación de larga duración

↳ TempoCem NE

Adhesión y remoción mejoradas sin eugenol

↳ TempoCem ID

Excelente estética gracias a una transparencia óptima

Mejora y reparación

↳ LuxaFlow Star

Perfecto para mejorar y reparar restauraciones provisionales

↳ **Luxatemp MaxProtect** se ofrece en la siguiente presentación:

Contenido: 1 Cartucho de 50 ml, 15 Automix Tips

Tono BL REF 130105

Tono A1 REF 130100

Tono A2 REF 130101

Tono A3

Tono A3.5

Tono B1

REF 130102

REF 130103

REF 130104

Accesorios:

45 Automix Tips Blue 10:1

1 Automix Dispenser Type 50 10:1

REF 110409

REF 110411

A smile ahead
together



DMG

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Elbgastraße 248 22547 Hamburg Germany

Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222

info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com

www.facebook.com/dmgdental

