



L'infiltration avec Icon smooth surface : méthode micro-invasive avec une large gamme d'indications.



Davantage d'informations sur les étapes de diagnostic et de traitement sont à votre disposition sur la page suivante et sur www.dmg-dental.com/icon-vestibular



HISTORIQUE DENTAIRE ET DIAGNOSTIC

Taches blanches

Fluorose

Traumatismes

MIH *

Diagnostic de la profondeur de la tache

Lésion superficielle

Lésion mixte

Lésion profonde

Blanchiment (si nécessaire)

Attendre 2 semaines

14

Digue en caoutchouc/ digue liquide

Micro-abrasion (optionnelle)

Sablage/micro-abrasion

Fraise diamantée

Icon-Etch

2 min

Répéter

Taches réduites

Icon-Dry

30 sec

Les taches sont encore visibles

≥3 min

Icon-Infiltrant

Photopolymérisation

40 sec

40 sec

Photopolymérisation

Icon-Infiltrant

1 min

Ajouter composite (optionnel)

Polissage

PRÉ-TRAITEMENT

INFILTRATION

* La MIH n'est pas indiquée dans les instructions d'utilisation du fabricant.